

Устройство для тестовой нейростимуляции НейСи-3М.ТС



Руководство по эксплуатации
Версия 2.1

1. Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, конструкцией, техническими характеристиками Устройства для тестовой нейростимуляции НейСи-3М.ТС (далее по тексту «стимулятор»), а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание стимулятора в постоянной готовности к действию. Микропроцессорная технология обработки сигналов обеспечивает высокую функциональность, точность и надежность устройства.

2. Назначение

2.1 Стимулятор, предназначен для электростимуляции с помощью многоконтактных электродов. Электроды подключаются к стимулятору через переходной кабель с разъемом.

2.2 Стимулятор предназначен для стимуляции пациентов по индивидуальной программе, сохраняемой в энергонезависимой памяти.

2.3 Стимулятор позволяет изменять и сохранять в энергонезависимой памяти режимы и параметры стимуляции индивидуально для каждого пациента.

2.4 Подключение стимулятора к персональному компьютеру через беспроводное Bluetooth соединение позволяет на компьютере изменять персональные данные по режимам стимуляции для пациентов, сохранять данные на внешнем носителе и переносить данные из внешнего носителя в стимулятор.

3. Основные технические данные и характеристики

3.1 Состав стимулятора:

- тестовый нейростимулятор;
- кабель для подключения электродов;
- зарядное устройство.

3.2 Стимулятор обеспечивает формирование импульсов положительной, отрицательной полярности, а также формирование последовательности импульсов с изменяемой от импульса к импульсу полярностью.

3.3 Количество контактов – до 4-х.

3.4 Органы управления стимулятора показаны на рис.3.1:

- четыре кнопки Контакт №1 – Контакт №4, для переключения полярности контактов;

- четыре красных светодиодных индикатора наличия положительного напряжения на соответствующем контакте;

- четыре зеленых индикатора наличия отрицательного напряжения на соответствующем контакте;

- кнопка «РЕЖИМ» для переключения режимов: «монополярный»; «биполярный»;

- два желтых индикатора режимов: «монополярный»; «биполярный»;

- жидкокристаллический дисплей для индикации параметров;

- двухцветный светодиодный индикатор «Аккумулятор» для индикации состояния заряда аккумулятора;

- кнопка «ВКЛ» для включения/отключения питания стимулятора;

- пять кнопок (джойстик) для управления индикацией и программирования параметров;

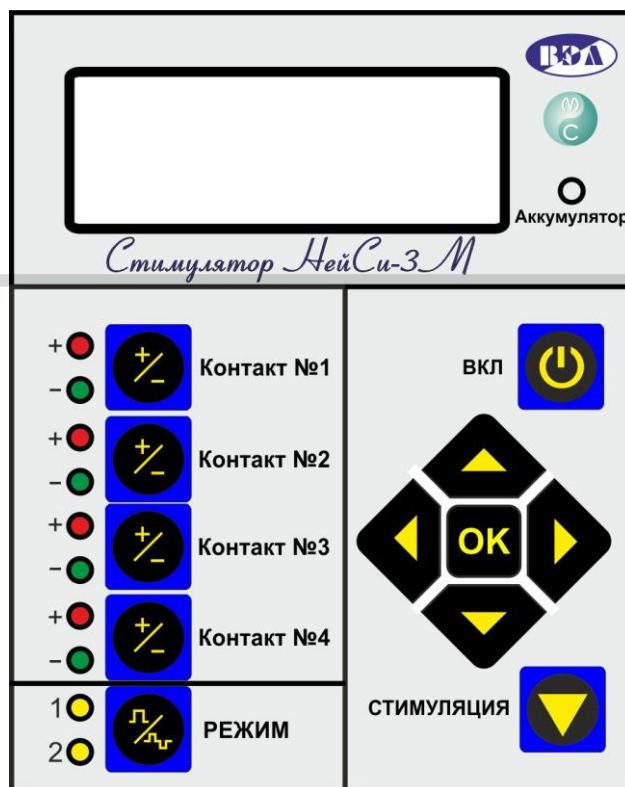


Рис. 3.1. Органы управления стимулятора

- кнопка «СТИМУЛЯЦИЯ» для включения/отключения стимуляции;
- разъем для подключения электрода или зарядного устройства (на задней стенке стимулятора);

3.5 Стимулятор работает в следующих режимах:

- работа;
- программирование;
- связь с компьютером;
- зарядка.

3.6 Стимулятор обеспечивает стимуляцию импульсами напряжения или импульсами тока в режимах, соответственно: «Напряжение»; «Ток». Импульсы прикладываются к произвольно выбираемой паре контактов. Импульсы подаются пачками с программируемой длительностью и паузой между пачками.

3.7 Параметры стимуляции:

- программируемая частота импульсов (0...199) Гц, с шагом 1Гц;
- программируемая длительность импульсов (10...2500) мкс, с шагом 10 мкс;
- диапазон программируемых напряжений импульсов (0...10,3) В, с шагом 0,1 В, при сопротивлении нагрузки не менее 1 кОм;

- максимальный ток в режиме стимуляции импульсами напряжения 10 мА;
- диапазон программируемых токов импульсов (0...10,3)мА, с шагом 0,1мА;
- максимальное напряжение в режиме стимуляции импульсами тока 10,3 В;
- длительность пачек импульсов (1...3 600) с;
- пауза между пачками (0...3 600) с.

3.8 В режиме с модуляцией скважность генерируемых импульсов $60 \pm 10\%$, частота импульсов изменяется от 2-х до 140 Гц и обратно до 2-х Гц.

3.9 Для удобства, в режиме программирования можно выбрать предварительно установленные параметры интраоперационной стимуляции:

- местная анестезия: 1,5 В; 100 Гц; 200 мкс. (ощущение парестезии).
- общая анестезия: 3 В; 5 Гц; 200 мкс. (сокращение мышц).

3.9 Режимы и параметры стимуляции могут быть изменены и сохранены в энергонезависимой памяти стимулятора для каждого пациента отдельно. Количество пациентов 100.

3.10 При включении стимуляции, амплитуда импульсов возрастает плавно от нуля до 100% от установленного значения напряжения (тока), время нарастания 1 секунда.

3.11 Двухцветный светодиодный индикатор стимулятора обеспечивает следующую индикацию состояния аккумулятора:

3.11.1 В режимах «Работа» и «Программирование»:

- горит зеленый – аккумулятор заряжен;
- мигает зеленый – аккумулятор требует заряда;
- горит красный – аккумулятор разряжен, через 5 секунд стимулятор автоматически выключается;

3.11.2 В режиме «Зарядка»:

- горит красный – идет зарядка;
- мигают поочередно красный, зеленый – зарядка закончена;
- на ЖКИ отображается напряжение аккумулятора и ток заряда.

3.12 Время непрерывной работы стимулятора при полном заряде аккумулятора не менее 6-ти часов.

3.13 Время заряда аккумулятора не более 4-х часов.

3.14 Стимулятор удовлетворяет требованиям к электробезопасности согласно ГОСТ 12.2.025 – 76.

3.15 Стойкость к внешним воздействующим факторам.

3.15.1 Стойкость к механическим внешним воздействиям – в соответствии с ГОСТ 20790, по группе 2.

3.15.2 Стойкость к климатическим внешним воздействиям – по ГОСТ 20790,

4.1.5 Светодиоды индикатора подключения напряжения указывают, к каким контактам и в какой полярности прикладываются импульсы, красный светодиод – положительный контакт, зеленый - отрицательный.

4.1.6 Светодиоды «Режим» указывают режим стимуляции, «1» - монополярный, «2» - биполярный. В режиме с модуляцией светодиоды «Режим» мигают попеременно.

4.1.7 Светодиод «Аккумулятор» показывает состояние аккумулятора.

4.1.7 Для включения стимуляции необходимо нажать кнопку **[Стимуляция]**. При включенной стимуляции импульсы прикладываются к контактам подключенного электрода. Светодиоды, указывающие подключенные контакты и их полярность, мигают. Мягкий старт обеспечивает плавное нарастание амплитуды импульсов от нуля до запрограммированного значения. Плавное нарастание амплитуды применяется только для первой пачки импульсов.

4.1.8 Для выключения стимуляции необходимо повторно нажать кнопку **[Стимуляция]**. При этом мигание светодиодов прекращается.

4.1.9 В режиме «Работа» и в процессе стимуляции можно изменить номера контактов и полярность импульсов. Для изменения полярности или номера контакта, нажатием одной из кнопок **[Контакт1, ..., Контакт 4]** выбирается номер контакта, к которому прикладывается положительное напряжение импульса. При этом загорается красный светодиод с номером соответствующего контакта. Следующим нажатием определяем контакт, к которому прикладывается отрицательное напряжение. При этом загорается зеленый светодиод соответствующего контакта. Следующие последовательные нажатия кнопок позволяют перепрограммировать положительный и отрицательный контакт. Импульсы можно приложить только к двум выбранным контактам.

4.1.10 В режиме «Работа» и в процессе стимуляции можно изменить режим стимуляции «Монополярный» - «Биполярный». «Монополярный» режим стимуляции обеспечивает генерирование импульсов одной полярности и подачу их на выбранные контакты. «Биполярный» режим стимуляции обеспечивает генерирование импульсов с изменяемой от импульса к импульсу полярностью и подачу их на выбранные контакты. Выбор режима стимуляции «Монополярный» - «Биполярный» производится кнопкой **[РЕЖИМ]**, номер режима индицируется светодиодным индикатором {1} или {2}. Форма импульсов в режимах «Монополярный» - «Биполярный» показана на рисунке 4.2 (а, б).

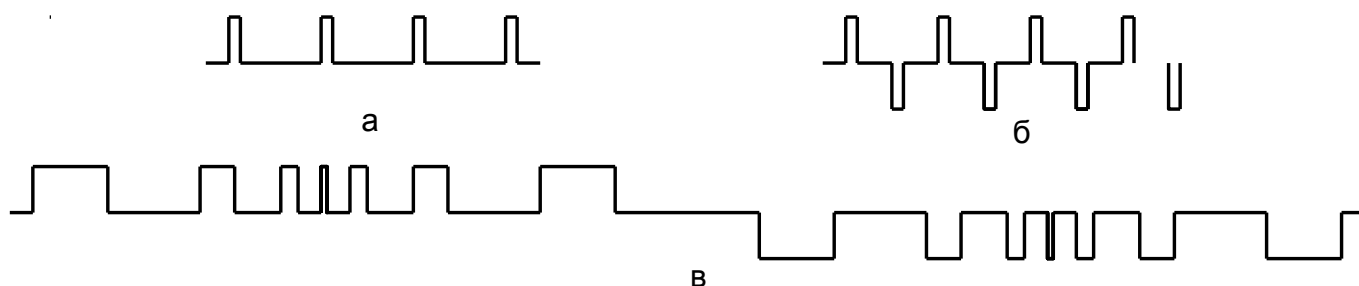


Рис. 4.2. Форма импульсов в режимах: а - «Монополярный»; б - «Биполярный»; в - «Модуляция частоты и длительности импульсов».

4.1.11 Изменения номеров положительного и отрицательного контактов и режима «Монополярный» - «Биполярный» действуют до выключения стимуляции. При необходимости сохранения режима стимуляции для выбранного пациента в энергонезависимой памяти, необходимо нажать кнопку **[ОК]**.

4.1.12 Нажимая кнопки **[▲]** или **[▼]** можно изменять номера пациентов как при включенной, так и при выключенной стимуляции. Одновременно происходит и соответствующее изменение параметров стимуляции. Количество пациентов 100 (1-100).

4.3.3 Для изменения значения параметра необходимо нажать или удерживать кнопку [▲] или [▼].

4.3.4 Список программируемых параметров и диапазон допустимых программируемых значений приведен в таблице 4.1

Таблица 4.1

	Параметр	Диапазон Значений	Единица измерения
1	Программирование напряжения	ВКЛ./ВЫКЛ.	
2	Программирование тока	ВЫКЛ./ВКЛ.	
3	Напряжение (ток)	00,0...10,3	В (мА)
4	Частота импульсов	000*...199	Гц
5	Длительность импульса	10...2500	мкс
6	Длительность пачки импульсов	1...3 600	с
7	Пауза между пачками импульсов	0...3 600	с
8	Местная анестезия	↑(ЗАПИСЬ)	
9	Общая анестезия	↑(ЗАПИСЬ)	

4.3.5 * При установке частоты импульсов 000 Гц включается режим с модуляцией частоты и длительности импульсов, рис 4.2.в.

4.3.6 Изменение программируемых параметров сразу изменяет параметры генерируемых импульсов.

4.3.7 Имеется возможность выбирать предварительно установленные параметры при проведении интраоперационной стимуляции:

- при проведении операции с местным обезболиванием - параметры «Местная анестезия», 1,5 В; 100 Гц; 200 мкс. (увеличивать амплитуду импульсов до ощущения парестезии).

- при проведении операции с общей анестезией и отсутствии продуктивного контакта с пациентом - параметры «Общая анестезия», 3 В; 5 Гц; 200 мкс. (увеличивать амплитуду импульсов до получения сокращения мышц).

4.3.8 Параметры «Местная анестезия» или «Общая анестезия» вводятся при выборе соответствующей строки и нажатии кнопки [▲]. При необходимости, эти параметры можно изменять и сохранять в энергонезависимой памяти индивидуально для данного пациента.

4.3.9 Для записи измененных значений для выбранного пациента в энергонезависимую память и для выхода из режима «Программирование» необходимо нажать кнопку [OK]. Если измененные параметры запоминать на надо, необходимо выключить стимулятор кнопкой [ВКЛ].

4.3.7 Установка связи с компьютером через Bluetooth соединение и порядок обмена описаны в документе: «Инструкция по работе с программой для связи с тестовым стимулятором НейСи-3М». Для включения стимулятора в режим связи с компьютером, необходимо последовательно нажать и удерживать кнопки [OK] и [ВКЛ]. Не рекомендуется включать режим связи с компьютером при мигающем индикаторе «Аккумулятор», в этом случае аккумулятор необходимо подзарядить. Для выключения режима связи с компьютером, надо нажать и удерживать кнопку [ВКЛ].

